

## **Omschrijving**

Een gebruiksklare oplossing met polyhexanide en undecylenamidopropyl Betaïne. Het reinigt, bevochtigt en houdt wonden en wondverbanden vochtig.

## **Eigenschappen**

- Verwijdert fibrinelagen en resten op een weefselvriendelijke manier.
- Geen afremming van granulatie en epithelisatie, snelle absorptie van onaangename wondgeuren.
- Steriele product, tot 8 weken na opening houdbaar

## **Werking**

Celresten, fibrinelagen, bacteriën vormen een vaste wondbedekking, benoemd biofilm, die moeilijk oplost.

Penetreert de biofilm en maakt de wonde vrij door een grondige reiniging van de wonde.

## **Indicaties**

- Aanbevolen voor de reiniging van chronische wonden en vuile wonden.

## **Gebruiksaanwijzing**

- Oplossing : Direct toepassing met een praktische sproeifles (40ml/350ml)  
Ofwel, bevochtigd kompres 10 op de wonde laten om de biofilm los te weken.
- Gel : laagje gel van minstens 3-5 mm dikte om te wonden te bedekken; daarna verder verband aanleggen

*Prontosan wordt verkocht door B.Braun*

[\*klik hier voor een snelkoppeling naar de fabrikant\*](#)